


Annexe 1 : QUANTIFERON

Réception des prélèvements de Quantiféron :

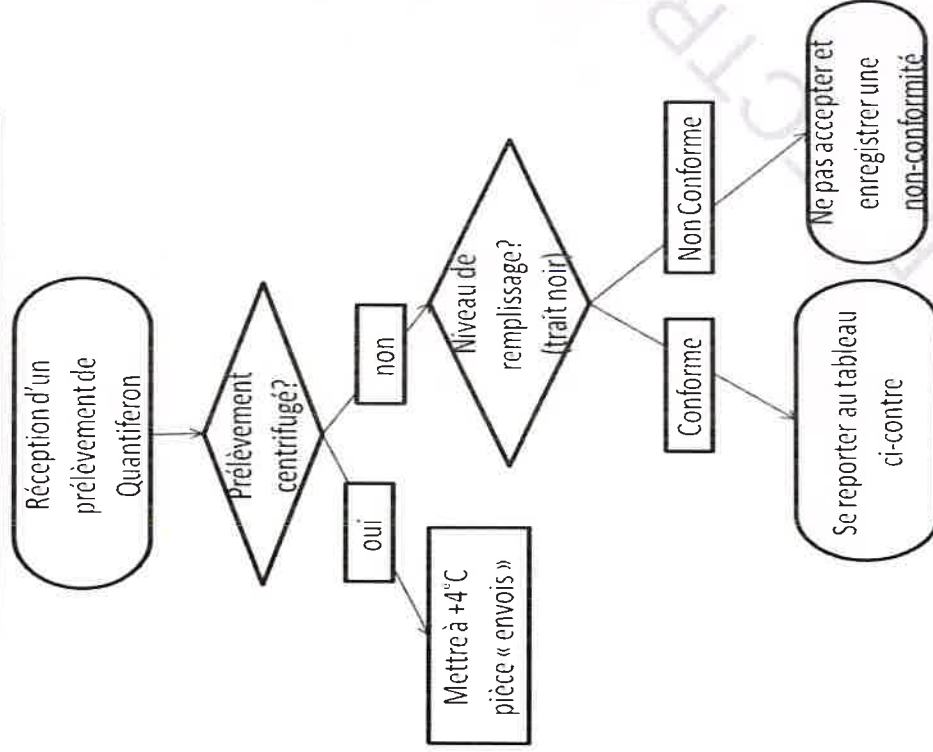

- Agiter 10 fois par retournement et mettre à l'étuve, noter l'heure de mise à l'étuve sur la feuille de réception des quantiférons
- Mettre le prélèvement dans la boîte « IMMUNO » à température ambiante
- Ne pas accepter et enregistrer une non-conformité

LUNDI	MARDI A JEUDI	VEILLE DE FERIE	JOUR FERIE	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
0H – 1H	0H – 1H	0H – 1H	0H – 1H	0H – 1H	0H – 1H	0H – 1H
1H – 2H	1H – 2H	1H – 2H	1H – 2H	1H – 2H	1H – 2H	1H – 2H
2H – 3H	2H – 3H	2H – 3H	2H – 3H	2H – 3H	2H – 3H	2H – 3H
3H – 4H	3H – 4H	3H – 4H	3H – 4H	3H – 4H	3H – 4H	3H – 4H
4H – 5H	4H – 5H	4H – 5H	4H – 5H	4H – 5H	4H – 5H	4H – 5H
5H – 6H	5H – 6H	5H – 6H	5H – 6H	5H – 6H	5H – 6H	5H – 6H
6H – 7H	6H – 7H	6H – 7H	6H – 7H	6H – 7H	6H – 7H	6H – 7H
7H – 8H	7H – 8H	7H – 8H	7H – 8H	7H – 8H	7H – 8H	7H – 8H
8H – 9H	8H – 9H	8H – 9H	8H – 9H	8H – 9H	8H – 9H	8H – 9H
9H – 10H	9H – 10H	9H – 10H	9H – 10H	9H – 10H	9H – 10H	9H – 10H
10H – 11H	10H – 11H	10H – 11H	10H – 11H	10H – 11H	10H – 11H	10H – 11H
11H – 12H	11H – 12H	11H – 12H	11H – 12H	11H – 12H	11H – 12H	11H – 12H
12H – 13H	12H – 13H	12H – 13H	12H – 13H	12H – 13H	12H – 13H	12H – 13H
13H – 14H	13H – 14H	13H – 14H	13H – 14H	13H – 14H	13H – 14H	13H – 14H
14H – 15H	14H – 15H	14H – 15H	14H – 15H	14H – 15H	14H – 15H	14H – 15H
15H – 16H	15H – 16H	15H – 16H	15H – 16H	15H – 16H	15H – 16H	15H – 16H
16H – 17H	16H – 17H	16H – 17H	16H – 17H	16H – 17H	16H – 17H	16H – 17H
17H – 18H	17H – 18H	17H – 18H30	17H – 18H	17H – 18H30	17H – 18H	17H – 18H
18H – 19H	18H – 19H	18H30 – 19H30*	18H – 19H	18H30 – 19H30*	18H – 19H	18H – 19H
19H – 24H	19H – 24H	19H30 – 24H	19H – 24H	19H30 – 24H	19H – 24H	19H – 24H

Lors de l'enregistrement ou de l'acquittement des Quantiférons : dans les fenêtres qui s'ouvrent dans Glims, **scanner** (ou saisir) **les numéros de lot** (cf. étiquette collée sur la pochette et/ou la feuille de renseignements cliniques).

***Vendredi et veilles de jours fériés de 18h30 à 19h30** : à titre exceptionnel (consultation, médecine du travail, patient sorti) les « quantiféron » peuvent être accepté jusqu'à 19h30 : incubation immédiate et noter sur la feuille de traçabilité des quantiférons de ne faire la centrifugation qu'à 11h30 (minimum 16h d'incubation). Dans ce cas il est possible de centrifuger tous les tubes à 11h30.

Le samedi et les jours fériés : centrifugation par la RCP entre 10h30 et 11h00 des tubes reçus et mis à l'étuve la veille (2700g, 15minutes) et les mettre au réfrigérateur. Noter l'heure de centrifugation sur la feuille de réception des quantiféron.